



Prodotto: Sollevatore elettrico speciale per il trasferimento dei pazienti easyGO

Articolo: 0 - Adjutor

Rif. Interno: ADI001

Descrizione

EasyGO è un sollevatore speciale con un sistema di sollevamento del paziente unico nel suo genere. EasyGO è disponibile con un meccanismo elettrico e una batteria ricaricabile. Consente di sollevare il paziente con due soli movimenti e di posizionarlo sul letto, sulla sedia a rotelle, sulla toilette, in auto o in qualsiasi altro luogo desiderato.

In sintesi, ciò che dobbiamo sapere affinché easyGO ci serva al meglio:

- Quando la persona di cui ci prendiamo cura comunica e dispone di un supporto di base per la schiena
- La fessura sotto il letto deve essere alta 16 cm, in modo che la base di easyGO possa passarci attraverso
- Le pedane della carrozzina a cui easyGo si avvicina devono essere rimovibili o pieghevoli. In questo modo si ottiene il massimo avvicinamento
- L'apertura della porta deve essere di 68 cm in modo che possa passare attraverso la porta.

SUGGERIMENTI:

Base più larga

Sarebbe meglio regolare preventivamente la larghezza della base senza che il paziente salga sull'easyGO, aprendo una gamba della base o entrambe.

Nel caso in cui il paziente sia già seduto, sarebbe utile posizionare un piccolo sedile da bagno sotto il bacino/le natiche, in modo che possa "sopportare" il peso del paziente e poi tirare facilmente la base da entrambi i lati e regolarla.

Nel caso in cui si utilizzi spesso la base apribile, è consigliabile scegliere il modello con il sistema easyopen.

Nota: le parti elettroniche non devono bagnarsi

Dati tecnici

Larghezza base	cm 67-105
Lunghezza	cm 108
Altezza base	cm 15
Altezza seduta regolabile	cm 38-78
Peso	kg 35
Portata massima	kg 115