



**Prodotto:** Collare Cervicale Morbido altezza 8,5 cm  
Gibaud 1106

**Articolo:** 1106 - Gibaud

**Rif. Interno:** DUA1106

## Descrizione

---

### Indicazioni

Lesioni cervicali lievi o condizioni che richiedono una limitazione dei movimenti del rachide cervicale, come:

- lesioni da iperestensione del collo (colpo di frusta)
- ernia del disco cervicale
- spondilolisi cervicale
- artrite reumatoide e osteoartrite del rachide cervicale

### Funzione principale del Dispositivo Medico

Il dispositivo medico limita i movimenti del rachide cervicale

### Caratteristiche

Collare cervicale morbido con chiusura a strappo

Guaina di protezione

Altezza cm 8,5

### Composizione Tessile

Involucro: 100% cotone

Imbottitura: 100% poliuretano

### Come si indossa

Posizionare il collare mantenendo la chiusura a strappo nella parte posteriore.

Regolare la chiusura in modo da garantire un uso confortevole e un corretto sostegno.

### **Controindicazioni**

Il collare non deve essere usato per lesioni diverse da quelle lievi.

### **Avvertenze e precauzioni di impiego**

Conservare in un ambiente asciutto al riparo dal calore eccessivo e dalla luce.

Il prodotto è stato studiato per l'utilizzo da parte di una sola persona, non utilizzarlo su più persone.

Il prodotto non deve essere utilizzato a diretto contatto con cute lesa.

Nel caso si riscontrassero problemi nell'uso del prodotto quali la comparsa di dolore o segni locali evidenti, rimuoverlo e contattare un operatore sanitario.

In caso di incidente grave a seguito dell'uso del prodotto contattare il fabbricante e l'operatore sanitario di competenza territoriale.

In caso di utilizzo per più di dieci giorni del dispositivo, è necessaria una dismissione graduale e un controllo medico

E' consigliabile, la prima volta, far posizionare il prodotto da un operatore qualificato ed eseguire autonomamente i posizionamenti successivi con le stesse modalità.

### **Istruzioni per il lavaggio**

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, strizzare delicatamente, lasciare asciugare orizzontalmente. Non candeggiare, non asciugare in asciugatrice, non stirare, non lavare a secco.

### **Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili**

Scopri anche gli altri [collari cervicali ortopedici Gibaud](#) in vendita nel nostro negozio online oppure valuta anche i [collari cervicali morbidi F.G.P](#) e i [collari cervicali semirigidi Orthoteh](#).