



Prodotto: Tutore fisso Alluce Valgo Notturmo H2
Hallux Valgus Gibaud 0801

Articolo: 0801 - Gibaud

Rif. Interno: DUA0801

Descrizione

Indicazioni

- Alluce valgo di lieve e media gravità
- Alluce rigido
- Artrosi dell'articolazione metatarsofalangea dell'alluce
- Borsite metatarsofalangea dell'alluce
- Tattamento pre e post operatorio

Caratteristiche

- Tutore per alluce ad uso notturno e domestico.
- Steccaggio laterale rigido ergonomico con foro per l'alloggiamento della "cipolla" dell'alluce.
- Morbida imbottitura per garantire maggior confort.
- Cinghia falangea e cinghia metatarsale regolabili tramite chiusure a strappo.
- Il tutore è ambidestro.

Come si indossa

Slacciare e allentare le due cinghie.

Infilare il piede in modo che la stecca risulti laterale all'alluce e la "cipolla" in corrispondenza dell'apposito alloggiamento.

Stringere le cinghie utilizzando le chiusure a strappo.

Composizione Tessile

40% poliammide

40% poliestere

20% elasthan

Stecca: 100% alluminio

Istruzioni di lavaggio

Lavare a mano in acqua a 30° C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, lasciare asciugare orizzontalmente. Non stirare.

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

È possibile [risolvere il problema dell'alluce valgo indossando delle scarpe](#) adatte? Leggi il nostro approfondimento