



Prodotto: Pressoterapia PressCare G 200M - 2
Gambali + Fascia Addominale

Articolo: G45XX - Globus

Rif. Interno: GLBG45XX

Descrizione

Questo modello dispone di due sequenze di gonfiaggio ed è particolarmente indicato per coloro che utilizzano il dispositivo per alleviare gonfiori e stanchezza agli arti o per ridurre la ritenzione idrica. Anche con questo modello sono previste diverse configurazioni di vendita e sarà possibile combinare fino a tre accessori contemporaneamente in modo da trattare, per esempio, entrambe le gambe e la zona addominale. **Si raccomanda di consultare il medico prima dell'utilizzo.**

- **MODE A:** la sequenza del programma prevede il gonfiamento e lo sgonfiamento del gambale un settore per volta, partendo da quello più distale (piede o mano) fino a quello più prossimale.
- **MODE B:** la sequenza del programma prevede il gonfiaggio di due camere per volta, simulando la funzione dei gambali a camere sovrapposte

Guida alla scelta del Gambale:

GAMBALI TAGLIA "S" (A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE cm 72 (B) CIRCONFERENZA COSCIA cm 60 con ESTENSIONE cm 70 (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA cm 37 con ESTENSIONE cm 42

GAMBALI TAGLIA "M" (A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE cm 82 (B) CIRCONFERENZA COSCIA cm 67 con ESTENSIONE cm 77 (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA cm 37 con ESTENSIONE cm 42

GAMBALI TAGLIA "L" (A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE cm 92 (B) CIRCONFERENZA COSCIA cm 74 con ESTENSIONE cm 84 (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA cm 40 con ESTENSIONE cm 45

FASCIA ADDOMINALE - TAGLIA UNICA (A) cm 133 - (B) cm 38 CIRCONFERENZA ADDOME da cm 82 a cm 114

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Prova il massaggio che rigenera della [macchina per pressoterapia professionale Globus a casa tua](#) e scopri come ridonare sollievo alle tue gambe.

Dati tecnici

Uscite 2

Programmi 2

Pressione 0-180 mmHg \pm 10%

Timer fino a 99 minuti

Alimentazione a rete 230 V AC, 50 Hz

Dimensioni 185x180x230 mm

Peso 3 Kg