



Prodotto: Pressoterapia PressCare G 300M - 1
Bracciale

Articolo: G5420 - Globus

Rif. Interno: GLBG5420

Descrizione

E' il modello top di gamma in quanto dispone di tre sequenze di gonfiaggio tra cui il programma sequenziale. Questo programma prevede il gonfiaggio della prima camera del manicotto e poi successivamente delle altre, fino ad arrivare alla compressione completa di tutto l'arto. Questa tipologia di sequenza è particolarmente consigliata dai medici per coloro che soffrono di edemi e linfedemi. Il modello G-300 è disponibile in diverse configurazioni a seconda di quali e quanti accessori si vogliono utilizzare. La lista completa delle configurazioni è disponibile nella scheda tecnica. **Si raccomanda di consultare il medico prima dell'utilizzo.**

- **MODE A:** la sequenza del programma prevede il gonfiamento e lo sgonfiamento del gambale un settore per volta, partendo da quello più distale (piede o mano) fino a quello più prossimale.
- **MODE B:** la sequenza del programma prevede il gonfiaggio di due camere per volta, simulando la funzione dei gambali a camere sovrapposte.
- **MODE C:** la sequenza del programma effettua la pressione partendo dal piede e mantenendo gonfie le camere precedenti fino a gonfiare l'intera parte (gamba, braccio o addome).

BRACCIALE - TAGLIA UNICA (A) cm 84 - (B) cm 63 (C)
 CIRCONFERENZA SPALLA cm 43 con ESTENSIONE cm 53 (D)
 CIRCONFERENZA POLSO cm 31 con ESTENSIONE cm 36

Scopri di più su Pianeta Ortopedia Ausili

Prova il massaggio che rigenera della [macchina per pressoterapia professionale Globus a casa tua](#) e scopri come ridonare sollievo alle tue gambe.

Dati tecnici

Uscite 2

Programmi 3

Pressione 0-180 mmHg \pm 10%

Timer fino a 99 minuti

Alimentazione a rete 230 V AC, 50 Hz

Dimensioni 185x180x230 mm

Peso 3 Kg