



Prodotto: Cetilar Tape

Articolo: PH45 - Cetilar

Rif. Interno: PHAPH45

Descrizione

Striscia adesiva anelastica a base di esteri cetilati (CFA) per articolazioni, muscoli e tendini

Cetilar® Tape è **una striscia adesiva anelastica** a base di acidi grassi di origine vegetale che contribuisce alla riduzione del dolore causato da affezioni muscolari e/o scheletriche o da traumi e contratture di varia origine.

La striscia adesiva anelastica contiene una formulazione a base di esteri cetilati (CFA) che, una volta applicata sulla zona interessata, contribuisce al recupero della mobilità migliorando la funzionalità e la capacità di movimento.

Cetilar® Tape, grazie alla natura lipidica degli esteri cetilati, svolge anche un'azione emolliente sull'area di applicazione, volta anche a prevenire fenomeni irritativi sulla pelle.

Cetilar® Tape:

- Aiuta a migliorare le funzionalità articolare
- Contribuisce a ridurre la rigidità
- Contribuisce a ridurre il dolore

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
La confezione contiene 1 striscia adesiva anelastica
4cmx2,5m



Tutti i prodotti della linea Cetilar® sono certificati *Play Sure Doping Free*, in quanto essendo dispositivi medici sono privi di qualsiasi sostanza dopante e pertanto particolarmente adatti a chi pratica sport ad ogni livello.


Striscia adesiva anelastica a base di esteri cetilati (CFA) ad azione locale per ridurre la sintomatologia dolorosa causata da traumi articolari e muscolari come stiramenti, contusioni, distorsioni o contratture.

QUANDO SI USA



Contusioni

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
L'applicazione di Cetilar® Tape è utile per il trattamento di riduzione della sintomatologia dovuta a contusioni. Grazie al pratico formato in striscia anelastica adattabile garantisce un intervento mirato e circoscritto alla zona interessata



Stiramenti


Cetilar® Tape coadiuva la riduzione del dolore in caso di stiramento muscolare. Taglia una striscia di Cetilar® Tape in

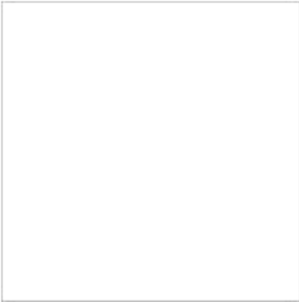base alle tue necessità e applica sulla pelle pulita e asciutta per 8 ore.



Distorsioni

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In caso di traumi come le distorsioni articolari o muscolari, è possibile applicare la striscia Cetilar® Tape sulla zona del corpo interessata dai sintomi e mantenere l'applicazione per 8 ore.



Contratture

L'utilizzo di Cetilar® Tape aiuta a moderare i sintomi legati alle contratture. Il pratico formato in striscia anelastica permette di intervenire su qualsiasi parte del corpo scegliendo le dimensioni più adatte alle tue esigenze.

COME SI USA

1. Estrarre la striscia.
2. Tagliare la striscia in base alla necessità.
3. Applicare su pelle pulita ed asciutta. Mantenere in situ per 8 ore.
4. Riporre il prodotto nella confezione

Scopri tutta la linea [Cetilar](#).

